


## StimuLITE®

Anti-Dekubitus-Sitzkissen  
Gebrauchsanweisung

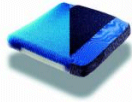

Technik & Reha Vertriebs GmbH

Gewerbering 47  
76287 Rheinstetten  
Tel: 07242 - 2579 60  
Fax: 07242 - 2579 610  
E-Mail: [info@t-rv.de](mailto:info@t-rv.de)  
Internet: [www.t-rv.de](http://www.t-rv.de)



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem StimuLITE®-Rollstuhlsitzkissen. Sie werden ein völlig neues Sitzgefühl **erfahren**: optimale Druckentlastung, trockenes Sitzen durch ständige Belüftung der Sitzfläche, das geringe Gewicht und die Hygiene durch die Möglichkeit, das Sitzkissen zu waschen, sind einige der vielen Vorteile.

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für die folgenden Versionen der StimuLITE® Anti-Dekubitus-Sitzkissen: Classic, Classic sling, Classic extra sensitive, Classic Maximum, Contoured, Contoured sling, Contoured extra sensitive, Slimline, Slimline sling, Slimline extra sensitive, Sport, Smart, Corbee und Corbee contoured.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten, an Ihren Fachhändler oder an t-rv GmbH, Gartenstraße 10, 76133 Karlsruhe, Tel: 07 21-38 45 60, Fax: 07 21-3 84 56 10, e-mail: [info@t-rv.de](mailto:info@t-rv.de). Über Neuheiten aus unserem Haus informieren Sie sich unter [www.t-rv.de](http://www.t-rv.de)

### 1. Indikation:

Die Stimulite Sitzkissen dienen der Druckentlastung zur Vorbeugung gegen Dekubitus bei Personen, die wegen Lähmungen aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder auf die Benutzung eines Rollstuhles angewiesen sind, Kontraindikationen sind nicht bekannt. Für den Einsatz im Rollstuhl bestehen keine Einschränkungen.

### 2. Wasch-Anleitung

Die StimuLITE®-Rollstuhlsitzkissen können entweder von Hand oder in der Waschmaschine gewaschen werden:

- \* Entfernen Sie den Bezug vom Sitzkissen und legen Sie den Kissenkörper in den mitgelieferten weißen Wasch-Beutel, der das Kissen vor Beschädigungen in der Waschmaschine schützt.
- \* Verwenden Sie wenig Feinwaschmittel **ohne Chlor** und waschen Sie getrennt das Kissen (Polyurethan) mit 40° und den Bezug (Cordura®, Polyamid) bei max. 60° im Feinwaschgang.
- \* Sie erhöhen die Lebensdauer der Bezüge, wenn Sie diese zum Waschen und Trocknen immer auf links wenden.
- \* Nach dem Waschen können Sie das Kissen bei niedrigen Temperaturen im Trockner trocknen, oft reicht der Schleudergang der Waschmaschine aus.
- \* Bitte achten Sie nach dem Waschen auf den korrekten Sitz des Bezuges auf Ihrem Sitzkissen: Die offenen Wabenzellen zeigen nach **oben** zur Sitzfläche, der Reißverschluss wird an der Rundung des Sitzkissens **hinten** geschlossen, wobei der gummierte Boden mit den Klett-Streifen des Bezuges nach **unten** zeigt.

Vor einem **Wiedereinsatz** ist die Eignung des Sitzkissens für den neuen Benutzer zu prüfen und das Kissen gemäß Anleitung zu waschen, ggf. mit einem handelsüblichen Mittel (z.B. Terralin®) zu desinfizieren.


### 3. Regelmäßige Überprüfung

Wie mit jedem neuen Sitzkissen ist es wichtig, während der ersten Tage der Benutzung die Haut genau zu beobachten. Während dieser Zeit passt sich das Sitzkissen an den Benutzer an, das subjektive Gefühl einer gewissen Härte verschwindet nach wenigen Tagen.

Auch nach der Eingewöhnungsphase muss das Kissen sowie der Patient weiterhin regelmäßig überprüft werden. Bei Durchsinken der Sitzknochen auf den Kissenboden oder dauerhaften Hautrötungen ist das Sitzkissen nicht weiterzubedenken.

Nehmen Sie bitte in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Therapeuten oder Fachhändler auf.

bitte wenden

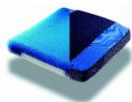**StimuLITE®**Anti-Dekubitus-Sitzkissen  
Gebrauchsanweisung

Technik &amp; Reha Vertriebs GmbH

Gewerbering 47  
76287 Rheinstetten  
Tel: 07242 - 2579 60  
Fax: 07242 - 2579 610  
E-Mail: info@t-rv.de  
Internet: www.t-rv.de**4. Garantiebedingungen:**

Für alle StimuLITE®-Sitzkissen übernimmt der Hersteller eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Lieferdatum. Sie gilt nicht für Verschleiß-Teile wie Bezüge. Die Gewährleistung bezieht sich auf nachweisliche Fabrikationsfehler. Nach frachtfreier Rücksendung behalten wir uns das Recht zur Nachbesserung oder Umtausch vor. Sitzkissen, die auf Maß zugeschnitten wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen.

**5. Wichtiger Hinweis:**

Die Verpflichtung, durch geeignete Maßnahmen nach therapeutischen Anweisungen den Sitzbereich zu entlasten, bleibt hiervon unberührt.

Technische Daten					
Sitzkissen-Version	Sitzbreite cm	Sitztiefe cm	Höhe cm	Gewicht kg	zulässige Belastung in kg
Classic + Sling-Version	36 - 61	36 - 61	7	1,5 - 2	0 - 130
Classic Sensitive	36 - 61	36 - 61	7	1,5 - 2	0 - 110
Classic Maximum	51 - 88	51 - 88	7,5	3 - 3,5	0 - 385
Contoured + Sling-Version	36 - 56	36 - 51	8	1,5	0 - 130
Contoured Sensitive	36 - 56	36 - 51	8	1,5	0 - 120
Slimline + Sling-Version	36 - 51	36 - 51	6	1,4	0 - 120
Slimline Sensitive	36 - 51	36 - 51	6	1,4	0 - 110
Sport	36 - 51	36 - 51	5	1	0 - 120
Smart	36 - 51	36 - 51	5	1	0 - 85
Corbee	26 - 36	26 - 36	5	0,5 - 1	0 - 70
Corbee Contoured	26 - 36	26 - 36	6	0,5 - 1	0 - 60
Silver	41 - 46	41 - 46	4	1	0 - 90
Material Sitzkissen:	Polyurethan				
Material Bezüge:	Polyamid				

Bei Sitzkissengrößen ab 50 cm (Sitzbreite oder Sitztiefe) kann die Belastung um 10 % erhöht werden.